

# Urostomie Produkte



**GRIBI AG BELP**

GRIBI AG Belp



## Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren

„Die Katze im Sack kaufen“ - ist ein bekanntes Sprichwort und wird im Wörterbuch für Redensarten wie folgt definiert:

etwas **kaufen**, ohne es vorher gesehen / geprüft zu haben;  
sich auf etwas Unbekanntes einlassen

Wir möchten schon, dass Sie sich auf etwas Unbekanntes einlassen (nämlich auf unsere Stomaprodukte der Marken Qualimed und Welland), jedoch ohne die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen zu müssen.

Diese Broschüre stellt Ihnen unser Sortiment an Urostomiebeuteln vor und zeigt Ihnen die Stärken und Vorteile unserer Produkte auf.

Um Ihnen den Katzenkauf im Sack zu ersparen, finden Sie auf der letzten Seite dieser Broschüre eine Musteranforderungskarte, damit Sie unsere Produkte vor dem Kauf prüfen können und sich von der hohen Qualität bei gleichzeitigem Tragekomfort überzeugen können.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre

Mit freundlichen Grüßen

Ihre GRIBI AG Belp



## Welland Liberty™



Die Welland Liberty™ Urostomiebeutel sind entwickelt worden, um die höchste Qualität, mit aussergewöhnlichem Nutzen zu verbinden.

Der einteilige Urostomiebeutel Welland Liberty™ hat eine Hautschutzplatte aus dem patentierten Welland Hyperflex® Hydrokolloid, welches sehr elastisch und weich ist. Diese Hautschutzplatten sind besonders freundlich zur Haut und verhindert Hautreizungen und Wunden rund um das Urostoma.

Welland Liberty™ Urostomiebeutel haben ein integriertes Rücklaufsystem, welches ein Rückfluss des Urin verhindert und so die Gefahr von Infektionen minimiert. Damit Infektionen, am sich bildenden Schleim, früh erkannt werden können, ist über dem Ablauf des Beutels ein transparentes Fenster angebracht.



Der Ablasshahn ist sehr weich und biegsam und verhindert Druckstellen auf der Haut. Die Bedienung des Ablasshahns ist denkbar einfach. Während der Nacht kann dieser Hahn mit einem Bettbeutel verbunden werden ohne die Verwendung eines zusätzlichen Adapters (es wird die Verwendung von Freedom Nachtbeutel empfohlen).

Jede Packung von Welland Liberty™ enthält „Anti-Verdreh-Hilfen“ mit welchen ein Verdrehen des Beutel ausgeschlossen wird, was besonders in der Nacht sehr hilfreich ist.

Welland Liberty™ Urostomiebeutel sind transparent und beige erhältlich. Die Beutel haben eine Startöffnung von 13 mm und können bis 60 mm ausgeschnitten werden.

Grösse	transparent	beige
13 mm	XFFL519	XFFL525

Packung 10 Beutel



## Welland Curvex® Urostomie



Die gewölbte Form der Hautschutzplatte der Curvex®-Beutel passt sich besser an das Stoma an und macht Ihre Versorgung dadurch sicherer. Curvex® ist besonders bei unebenen und zu Leckagen neigenden Stomas zu empfehlen, wobei die Hautschutzplatte wie bei allen Welland Beuteln sehr flexibel und weich ist und Ihnen den grösstmöglichen Tragekomfort gewährt.

Die dreidimensionale Hautschutzplatte erspart Ihnen die Verwendung von teurerer Stomapaste, zusätzlichen Fixierplastern und Stomagürteln.

Die Curvex Beutel gibt es mit drei verschiedenen Plateaugrössen:

Das **25mm Plateau** mit einer Startöffnung von 13mm kann bis zu 25mm ausgeschnitten werden. Es stehen jeweils beige und transparente Beutel zur Auswahl.




Das **32mm Plateau** mit einer Startöffnung von 13mm kann bis zu 32mm ausgeschnitten werden. Es stehen jeweils beige und transparente Beutel zur Auswahl.

Das **43mm Plateau** mit einer Startöffnung von 13mm kann bis zu 43mm ausgeschnitten werden. Es stehen jeweils beige und transparente Beutel zur Auswahl.

Die richtige Auswahl der Plateaugrösse gewährt Ihnen den optimalen Tragekomfort und die grösstmögliche Sicherheit.

Um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Beutels zu helfen, finden Sie nachstehend eine kleine Hilfe für das Vorgehen zur Bestimmung der geeigneten Grösse für Ihre Bedürfnisse:

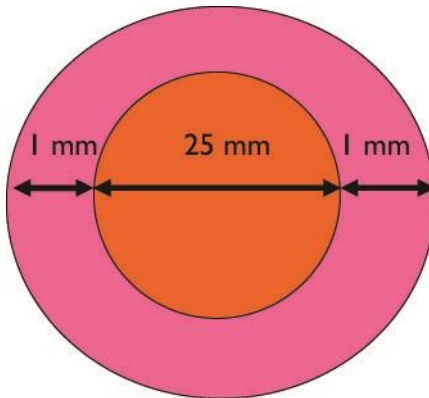

Am nachfolgenden Beispiel wird erklärt, wie Sie den geeigneten Curvex Urostomiebeutel auswählen:

Sie messen einen Stomadurchmesser von 25mm und rechnen noch zusätzlich je 1 mm rund um das Stoma als Abstand dazu und erhalten einen Messwert inkl. Abstand von 27mm. Demzufolge wird die mittlere Plateaugröße (32mm) benötigt, welche auf 27mm ausgeschnitten wird (Alternativ kann auch das grosse Plateau verwendet werden).

### Übersichtstabelle für Curvex®

Stomadurchmesser +	Plateaugröße
11—23 mm	Kleine Plateaugröße 25mm
13—30mm	Mittlere Plateaugröße 32mm
13—41 mm	Grosse Plateaugröße 43mm

### Wie stellen Sie sicher, dass die Hautschutzplatte richtig passt:

Wenn Curvex® in der richtigen Grösse ausgewählt wurde, so bietet Ihnen dieses Produkt grössten Tragekomfort und ist trotzdem frei von Leckagen. Wichtig ist, dass Sie beide Werte messen, den Stomadurchmesser und die unebene Region rund um das Stoma, wie



im Bild unten gezeigt.

So stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Plateaugrösse ausgewählt haben und auch den vollen Komfort von Curvex® nutzen können.



Für welche Stomas ist Curvex® besonders geeignet:



**Welland Curvex®** ist als transparenter und beiger Beutel erhältlich

**Welland Curvex®** wurde speziell für schwierige und unebene Stomaanlagen konzipiert

**Welland Curvex®** mit der extrem flexiblen und gewölbten (convexen) Basisplatte

**Welland Curvex®** mit drei verschiedenen Plateagrößen für eine sichere Anwendung ohne Leckagen und grösstmöglichen Tragekomfort

**Welland Curvex®** schont die Haut und macht die zusätzliche Anwendung von Fixierpflastern und Stomapasten überflüssig

Grösse	25 / 13 mm	32 / 13 mm	43 / 13 mm
Beige	CUS513	CUM513	CUL513
Transp.	CUS713	CUM713	CUL713

Packung 10 Beutel



**Ja, ich möchte die Produkte testen. Senden Sie mir bitte Muster von:**

Welland Liberty™

Welland Curvex®

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Vorname: ..... Name: .....

Adresse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Stoma-Durchmesser: ..... mm

✂ ..... Bitte ausschneiden und einsenden an: .....

# ***GRIBI AG BELP***

Hühnerhubelstrasse 59 CH-3123 Belp

Telefon +41 31 818 40 80

Telefax +41 31 818 40 85

E-Mail [info@gribi.ch](mailto:info@gribi.ch)

Internet <http://www.gribi.ch>

<http://www.wellandmedical.ch>