



WELLAND

## Stomagürtel



**GRIBI AG BERP**

GRIBI AG Berp



## Ein kleiner und schlauer Helfer

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Mit dem Stomagürtel hat Gribi AG Belp in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Welland Medical Ltd wieder einen kleinen und schlauen Helfer für die Stomaversorgung auf den Markt gebracht.

Unsere Stomagürtel sind in den benötigten Standardgrössen erhältlich und sind einfach zu reinigen. Der Kunststoffring kann von Hand abgewaschen werden und der Velcrogürtel übersteht einige Waschgänge in der Waschmaschine.

Die Stomagürtel sind ab Ende Mai 2006 erhältlich.

Sie können uns bei Unklarheiten oder Fragen wie folgt erreichen:

Telefon 031 818 40 80  
Telefax 031 818 40 85  
E-Mail [info@gribi.ch](mailto:info@gribi.ch)  
Web: <http://www.gribi.ch>

Mit freundlichen Grüssen

Ihre GRIBI AG Belp

Belp, April 2006



Befestigen Sie die eine Seite des Velcrogürtels an den davon vorgesehenen Ösen.

Ziehen Sie den Ring von unten über den Beutel, so dass der Ring auf die Hautschutzplatte zu liegen kommt.

Alternativ können Sie vor dem Anbringen des Beutels den Ring auf der Rückseite der Hautschutzplatte anbringen und den Velcrogürtel anschliessend durch die Ösen ziehen.



Schlaufen Sie das andere Ende des Velcrogürtels über den Rücken und fädeln Sie dieses in die zweite Öse ein.

Die Stomagürtel können stufenlos von 72—100 cm (Standard) respektive von 100—160 cm (Large) ver-

stellt werden.

Den Kunststoffring können Sie mit warmem Wasser reinigen. Den Velcrogürtel können Sie in der Waschmaschine bei 40° waschen. Achten Sie bitte darauf, dass die Velcroverschlüsse zum Waschen geschlossen sind.



### Tabelle zur Auswahl des richtigen Ringes

Beutel	Ringgrösse					
	67 mm	73 mm	77 mm	82 mm	92 mm	98 mm
1-teilige Beutel			●			
1-teilige Beutel vorge-	●					
32 mm Convex*				●		
48 mm Convex*					●	
45 mm 2-teilig*		●				
55 mm 2-teilig*				●		
70 mm 2-teilig*						●
Curvex 25 mm Plateau	●					
Curvex 32 mm Plateau			●			
Curvex 43 mm Plateau				●		

\* Markteinführung per Sommer/Herbst 2006

### Artikelnummern Welland Stomagürtel

Beutel	Ringgrösse					
	67 mm	73 mm	77 mm	82 mm	92 mm	98 mm
Standard	<b>XBLT067</b>	<b>XBLT073</b>	<b>XBLT077</b>	<b>XBLT082</b>	<b>XBLT092</b>	<b>XBLT098</b>
Large	<b>XBLT167</b>	<b>XBLT173</b>	<b>XBLT177</b>	<b>XBLT182</b>	<b>XBLT192</b>	<b>XBLT198</b>