

WELLAND
FlairXtra™



GRIBI AG BERP

GRIBI AG Berp



Inhaltverzeichnis

| | |
|--|----|
| Einleitung | 3 |
| Über Welland FlairXtra™ | 4 |
| Beutelaufbau | 6 |
| DUAL-CARB - Filter | 8 |
| Beutelwechsel - vier einfache Schritte | 10 |
| Lieferprogramm Welland FlairXtra™ | 11 |
| Musteranforderung | 12 |

Herausgeber:

GRIBI AG Belp, CH-3123 Belp

19.10.2009



Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wieder einmal ist es uns gelungen eine neue und innovative Stoma-Produktlinie in der Schweiz einzuführen:

Der weltweit erste und einzige über die Toilette zu entsorgende Stomabeutel Welland FlairXtra™

Ein über die Toilette zu entsorgender Stomabeutel, weshalb denn das? Diese Frage stellen Sie sich sicher zu Recht und wir wollen Ihnen diese in der vorliegenden Broschüre auch beantworten.

Dank **Welland FlairXtra™** bekommen Kolostomiepatienten ein grosses Stück Freiheit und Unabhängigkeit zurück, welches vielen nach der Operation als verloren schien. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei Freunden zu einer Party eingeladen und Sie gehen auf die Toilette um den Beutel zu wechseln. Sofort stellt sich die Frage wohin mit dem Beutel, wie kann ich diesen diskret entsorgen?

Mit **Welland FlairXtra™** stellt sich diese Frage nicht, weil Sie diesen Beutel über die Toilette wegspülen und niemand bekommt etwas mit.


Der gleichen Problemstellung sehen Sie sich auf Reisen, beim Einkaufen und bei der Arbeit gegenübergestellt. Auch hier lautet die einfache Antwort **Welland FlairXtra™**.

Wir möchten Sie einladen einen Anfang mit unseren **Welland FlairXtra™** Beuteln zu machen und die neue Unabhängigkeit und Freiheit zu geniessen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihre GRIBI AG Belp

Über Welland FlairXtra™

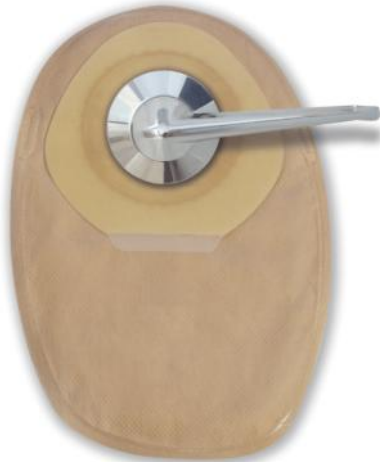

Diesem Beutel können Sie vertrauen

Bei 90% aller Toiletten wird Welland FlairXtra™ beim ersten und bei 100% beim zweiten Spülen entsorgt.

Dies belegen Tests des Europäischen Institutes für Abwasserforschung in Würzburg, Deutschland.

Welland FlairXtra™ baut sich innerhalb von drei Wochen in der Kläranlage vollständig und umweltverträglich ab, also in der gleichen Zeit, wie sich Fäzes in unseren Kläranlagen abbaut.

Sicher ist es für Sie wichtig zu wissen, dass dieser Beutel die Umwelt nicht zusätzlich belastet.

Welland FlairXtra™ ist ein Durchbruch in der Herstellungstechnologie von Stomabeuteln und gibt Ihnen die vertraute Sicherheit für ein normales Leben.

Welland FlairXtra™ über die Toilette zu entsorgen - schnell und einfach

- Die Ausscheidungen gelangen in einen Innenbeutel, welcher von einer Schutzhülle umgeben ist
- Der Innenbeutel wird von der Schutzhülle abgerissen und einfach die Toilette heruntergespült. Die saubere Schutzhülle wird mit dem normalen Hausmüll entsorgt

Welland FlairXtra™ gut und einfach mit Vorteilen für Sie

- Maximale Diskretion - moderne und kompakte Form; einfach, schnell zu applizieren und zu entfernen
- Maximale Unabhängigkeit - fortgeschrittene Filtertechnologie und kompromisslose Sicherheit des Beutels



Diskret, Toiletten-spülbar, unabhängig

Welland FlairXtra™ ist ein technologischer Durchbruch in der Herstellung von Stomabeuteln und gibt dem Anwender Freiheit und erweitert sein Angebot.

Es ist der erste und einzige Toiletten-spülbare Stomabeutel. Im Abwassersystem angelangt und in Kontakt mit Wasser, wird der Innenbeutel und die Basisplatte umweltverträglich aufgelöst. Während der Beutel durch das Abwassersystem fließt, wird er allmählich aufgelöst wie sich auch Toilettenpapier auflöst. Dies verhindert ein Verstopfen von Abwasserrohren. *Welland FlairXtra™* ist einfach zu verwenden und erlaubt eine saubere und hygienische Alternative zu gebräuchlichen Entsorgungstechniken von Stomabeuteln.




Der neue Toiletten-spülbare Beutel hat das Potential um die Menge von Plastikabfall in unseren Kehrichtverbrennungsanlagen drastisch zu verringern. Das weggespülte Material ist biologisch abbaubar und umweltverträglich. Der Beutel benötigt die selbe Zeit zum Abbau in den Kläranlagen wie Fäzes.

***Welland FlairXtra™* lässt Ihnen die Freiheit zum
Geniessen der wichtigen Dinge im Leben.**



Beutelaufbau

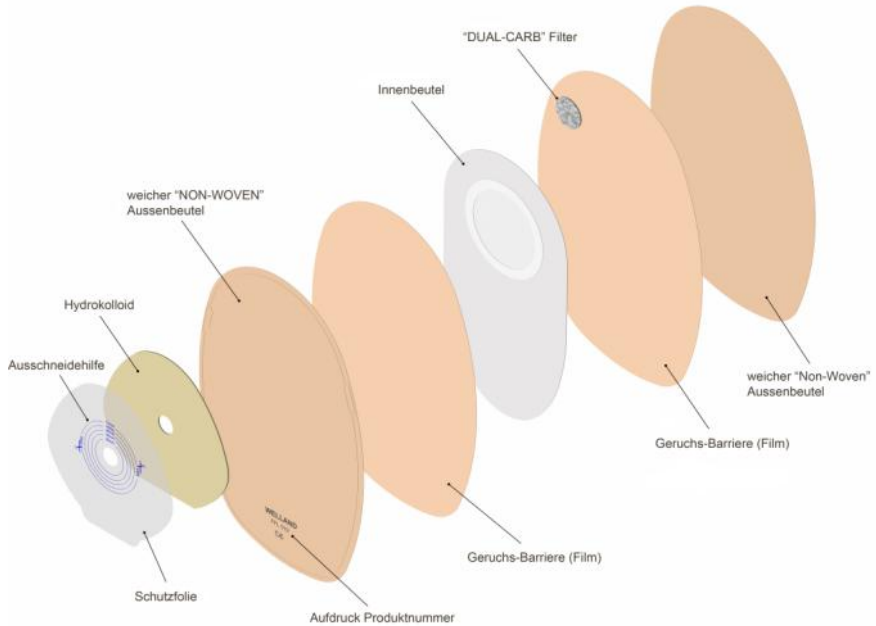

Schutzfolie mit Aussnehdehilfe

Dank der Aussnehdehilfe, welche die gängigsten Lochgrößen anzeigt, ist ein entsprechendes Ausschneiden der Lochgröße ein Kinderspiel.

Hydrokolloid

Die Basisplatte besteht aus einem hochwertigen Hydrokolloid welches Ihnen höchste Sicherheit und Tragekomfort gewährt.

Weicher „Non-Woven“ Aussenbeutel

„Non-Woven“-Material ist ein Textilstoff, welcher gegossen wird und ist deshalb viel feiner als herkömmlich verarbeitete Textilien. Der Aussenbeutel kommt direkt auf die Haut zu liegen und dank dem „Non-Woven“ Herstellungsverfahren ist dieser äusserst angenehm zu tragen.



Aufdruck Produktnummer

Auf jedem einzelnen **Welland FlairXtra™** Beutel ist die Produktnummer aufgedruckt. Dank dieser aufgedruckten Produktnummer auf jedem einzelnen Beutel werden Sie nie mehr den Müll nach der leeren Produktpackung durchsuchen.

Geruchsbarriere (Film)

Dieser Film riegelt den Innen- und Aussenbeutel hermetisch und gasdicht ab und es können keine Gerüche nach Aussen dringen. Diese Geruchsbarriere leistet einen sehr wichtigen Beitrag zum Tragekomfort von **Welland FlairXtra™**.

Innenbeutel

Der Innenbeutel ist der Kern des Toiletten-spülbaren Beutels und besteht aus umweltverträglichem Kunststoff, welcher sich in Kontakt mit Wasser auflöst. Beim Beutelwechsel wird der Innenbeutel vom Aussenbeutel getrennt und nur der Innenbeutel wird über die Toilette entsorgt, während der Aussenbeutel über den normalen Hausmüll entsorgt wird.

“DUAL-CARB”-Filter

Der patentierte “DUAL-CARB”-Filter filtert sämtliche Gase und Gerüche und sorgt für einen hervorragenden Tragekomfort. Dank dem innovativen und einzigartigen “DUAL-CARB”- Filter können absolut keine Gerüche aus dem Beutel austreten (vgl. Seite 8).

“DUAL-CARB” - Filter


Grundsätzlich können zwei Gerüche beschrieben werden, welche von Fäzes wahrgenommen werden können:

- Nach faulen Eiern, schwefelig riechender Geruch
- Nach Kabis riechender Geruch


Herkömmliche Kohlefilter können nur den einen oder anderen Geruch eliminieren, nicht aber beide. Der “DUAL-CARB” - Filter besteht aus einem Gemisch von einer technisch modifizierten und einer unmodifizierten Kohleart und ist in der Lage, beide Geruchsrichtungen zu neutralisieren.

Diese Kombination von modifizierter und unmodifizierter Kohle machen unsere Filter wesentlich wirksamer als Filter von vergleichbaren Produkten.

Filterwirkung von DUAL-CARB und vergleichbaren Filtern:

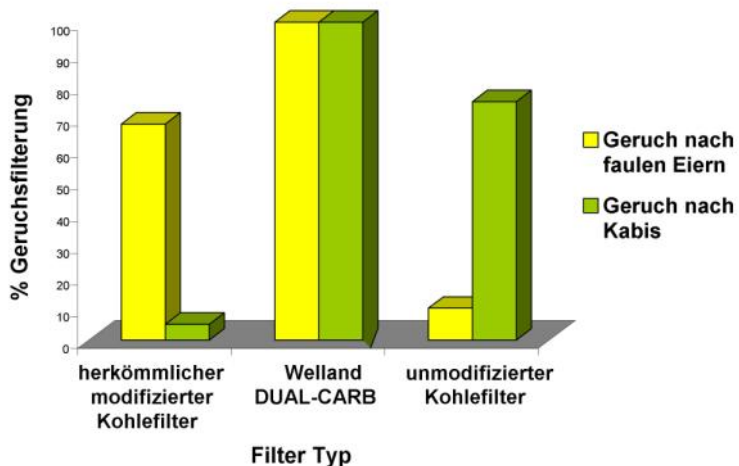

Funktionsweise des "DUAL-CARB - Filters:

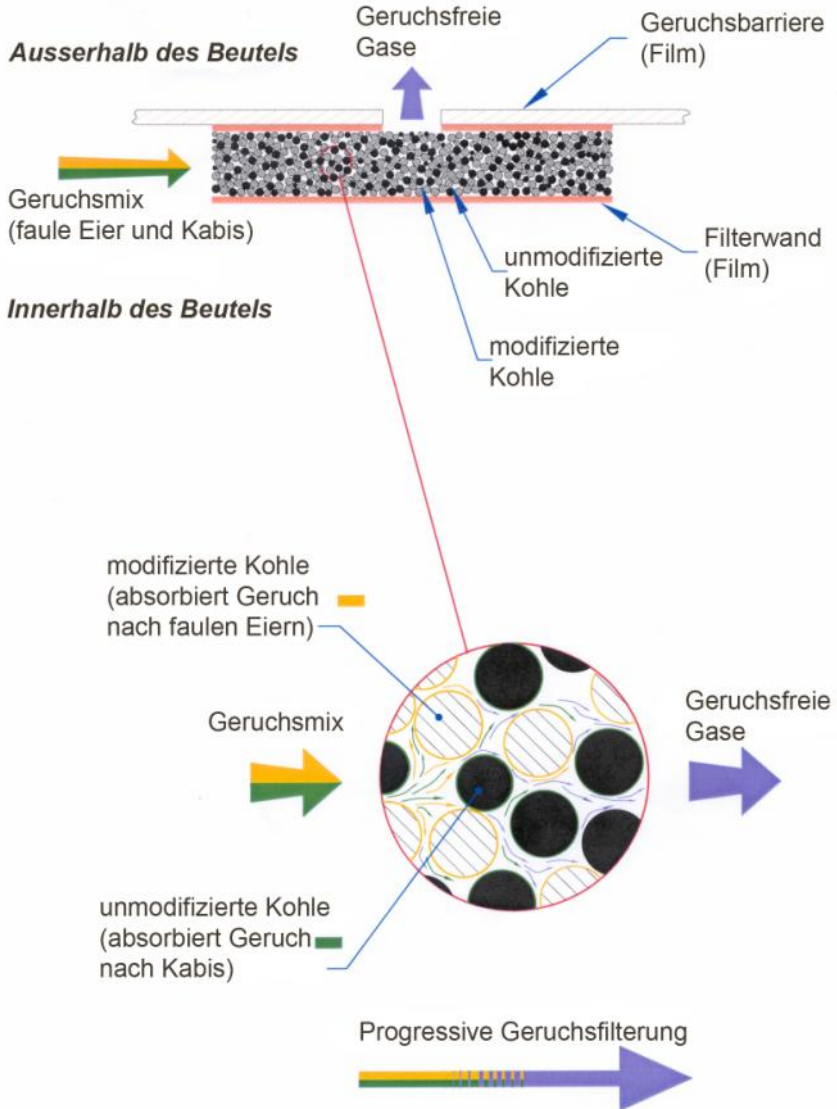



Beutelwechsel - vier einfache Schritte

Der Wechsel des Beutels gestaltet sich in vier einfachen Schritten:

Schritt 1



Legen Sie die rechte Hand auf die Basisplatte und halten diese fest. Mit der linken Hand fassen Sie den Aussenbeutel an den Markierungen.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht aus Versehen den Innenbeutel mitfassen.

Markierungen machen den richtigen Griff äusserst einfach.

Schritt 2



Reissen Sie sanft mit der linken Hand den Aussenbeutel nach links ab.

Trennen Sie den Aussenbeutel bis etwa zur Mitte der Basisplatte ab.

Schritt 3



Wiederholen Sie die beiden oben beschriebenen Handgriffe in umgekehrter Richtung und reissen den Aussenbeutel ab, bis Sie diesen über den Innenbeutel abziehen können.

Der so freigelegte und saubere Aussenbeutel wird über den normalen Hausmüll entsorgt.

Schritt 4



Werfen Sie den Beutel in die Toilette und warten Sie, bis sich der Beutel mit Wasser gefüllt hat. So können Sie sicherstellen, dass der Beutel weggespült wird.

90% der Toiletten spülen den Beutel mit der ersten Spülung weg, 100% mit der Zweiten.



Lieferprogramm **Welland FlairXtra™**


Welland FlairXtra™ ist in zwei Formen mit unterschiedlichen Kapazitäten für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich und Sie erlangen dadurch den grösstmöglichen Tragekomfort.



Welland FlairXtra™ wurde für eine besonders gute und unauffällige Passform und den sicheren Halt auf der Haut konzipiert.

Welland FlairXtra™ bietet Ihnen ein unübertroffenes Filtersystem dank dem patentierten "DUAL-CARB" - Filter.

Welland FlairXtra™ verhindert dank dem durchdachten Design Leckagen.

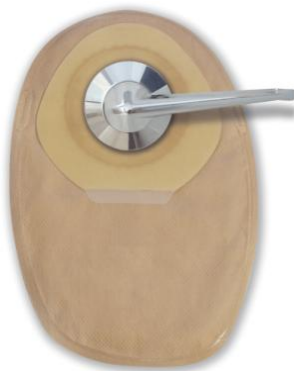Welland FlairXtra™ mit Innenbeutel, welcher einfach entfernt und über die Toilette entsorgt wird, während der saubere Aussenbeutel in den normalen Hausmüll gegeben wird.



| | Grösse | 19 mm | 25 mm | 29 mm | 32 mm | 35 mm | 38 mm | 44 mm |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | MAXI | XFFL519 | XFFL525 | XFFL529 | XFFL532 | XFFL535 | XFFL538 | XFFL544 |
|  | MIDI | XFFM519 | XFFM525 | XFFM529 | XFFM532 | XFFM535 | XFFM538 | XFFM544 |

Packungen mit 30 Beuteln

Musteranforderung

Ja, ich möchte den neuen **Welland FlairXtra™** ausprobieren und wünsche die Zusendung von Mustern

Vorname: Name:

Adresse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Stoma-Durchmesser: mm

Ausschneiden und Einsenden an: Gribi AG Belp
Hühnerhubelstrasse 59
3123 Belp

GRIBI AG BELP

Hühnerhubelstrasse 59 CH-3123 Belp

Telefon +41 31 818 40 80

Telefax +41 31 818 40 85

E-Mail info@gribi.ch

Internet <http://www.gribi.ch>

<http://www.wellandmedical.ch>