

FALLSTUDIE SCHWEIZ





ECKDATEN

Dauer: 1. März 2018 – 30. April 2019

Anzahl Stomazentren: 24

Anzahl Patienten: 78 (keine Neuanlagen)

Vollständig ausgefüllte Fragebögen: 54

Dauer der Anwendung: 30 Tage konsekutiv

ZIEL DER FALLSTUDIE

Ziel dieser Evaluation ist es, die Verbesserung des Hautzustandes durch die Verwendung der Beutel mit hautfreundlichem Manuka-Honig im Hydrokolloid zu überprüfen, im Vergleich zu den üblichen Beuteln der Teilnehmer und den damit verbundenen Auswirkungen auf ihre Lebensqualität (QOL).

MANUKA HONIG

Ist ein reines Naturprodukt und wird ausschliesslich aus dem Nektar der Manuka Blume in Neuseeland hergestellt.

Manuka Honig ist eines der ältesten bekannten Heilmittel, welches seit Jahrtausenden und bis heute verwendet wird dank seinen folgenden therapeutischen Eigenschaften:



Antibakteriell



Entzündungshemmend



Fördert das Zellwachstum



Besserer Heilungsprozess

Die vorbeugende Anwendung von Manuka Honig in der Stomatherapie ist daher nahe-liegend und sinnvoll. Für die Patientinnen und Patienten bedeutet dies, dass Ihre Haut um das Stoma besser geschützt wird.

**Schützt die
Haut rund
ums Stoma**



Die Ureinwohner Neuseelands, die Maori, wussten bereits um die herausragende Wirkung des Manuka Honig und behandelten damit Verletzungen, Durchfall und infektiöse Erkrankungen.

UNSERE HAUT – UNSER GRÖSSTES ORGAN

Aus ihr können wir nicht heraus

Die Gesundheit und der Zustand der peristomalen Haut ist speziell für Stomapatientinnen und Stomapatienten von grösster Wichtigkeit.

Sind doch nach Nybæk *et al*, Stomapatientinnen und Stomapatienten, welche an peristomalen Hautproblemen leiden anfälliger für Verletzungen durch das Abziehen von adhesivem Material.

Der Manuka-Honig in den Aurum Produkten kann helfen, die Haut gesund zu halten.

Die Einführung von medizinischem Manuka-Honig in die Hydrokolloid Stomplatte zielt darauf ab, eine gesunde Haut rund um das Stoma zu fördern.



ECKDATEN

Stomaart

Kolostomie	38%
Ileostomie	28%
Urostomie	10%
Andere	20%
Keine Angabe	4%

Geschlecht

Frauen	56%
Männer	42%
Keine Angabe	2%

Geographische Zuteilung


Deutschschweiz	46%
Westschweiz	49%
Tessin	5%

Accessoires

Accessoires im Einsatz	56%
------------------------	-----

HAUTZUSTAND

Wie ist der Zustand Ihrer entzündeten Haut nach 30 Tagen mit einer Hydrokolloid Platte mit Manuka Honig?

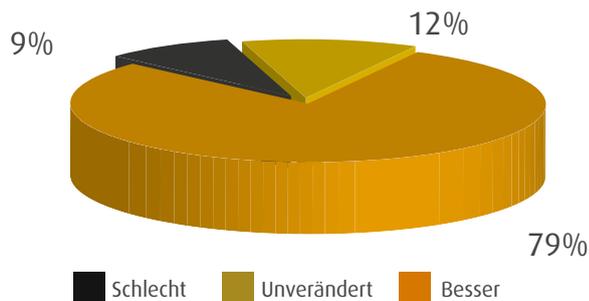


Bei 79% aller betroffenen Patientinnen und Patienten war die Entzündung nach 30 Tagen mit einem Aurum Produkt beseitigt.

« Die Hautrötung ist zurückgegangen und es gibt keine Leckagen mehr. »»

SICHERHEIT

Wie würden Sie die Sicherheit des Systems bewerten, nach 30 Tagen mit einer Stomaplatte mit Manuka Honig?

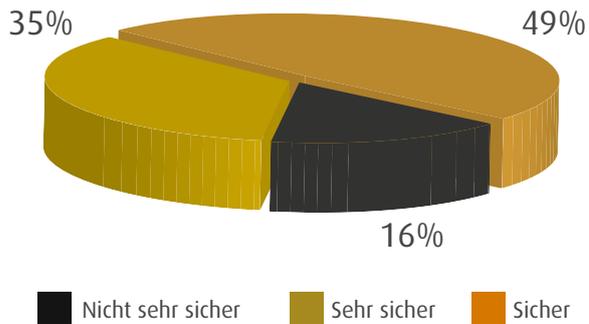

84% der Befragten beurteilten die Sicherheit einer Aurum Hydrokolloidplatte als sicher oder sehr sicher.

LECKAGEN

Leckagen vor und nach dem Test mit einer Aurum Hydrokolloidplatte

Anzahl Patienten vor dem Test mit Aurum

41

Anzahl Patienten nach dem Test mit Aurum

23

Verbesserung in %

43.9%

Nach 30 Tagen hatten von 41 Patientinnen und Patienten nur noch 23 Leckagen, dies bedeutet eine Verbesserung von **43.9%**

BALLOONING

Balloonung vor und nach dem Test mit einem Aurum Produkt

Anzahl Patienten vor dem Test mit Aurum

37

Anzahl Patienten nach dem Test mit Aurum

15

Verbesserung in %

40%

Nach 30 Tagen hatten von 37 Patientinnen und Patienten nur noch 15 Ballooning, dies bedeutet eine Verbesserung von **40%**

RESULTATE AURUM FALLSTUDIE



**86% empfehlen
Aurum weiter**

QOL –QUALITY OF LIFE

Lebensqualität

Beim Stoma QOL-Fragebogen wurden den Patientinnen und Patienten dieselben 20 Fragen über Ihre Lebensqualität vor und nach dem Test mit Aurum gestellt.

55% der 54 Befragten, welche die Fragebögen vollständig ausgefüllt haben, berichteten von einer allgemeinen Steigerung Ihres QOL-Wertes.

Ein herzliches Danke schön

an alle **Stomazentren**, allen **Stomatherapeutinnen** und **Stomatherapeuten** sowie an alle **Patientinnen** und **Patienten**, welche an unserer Studie teilgenommen haben. Sie ermöglichten uns nachzuweisen, dass Aurum mit Manuka Honig wirksam ist und helfen kann gesunde Haut zu fördern.

Aurum

with **Manuka Honey**

Plan, Convex, Curvex Profile

In verschiedenen Grössen,
als ein- oder zweiteiliges
System erhältlich.

WIR BERATEN SIE GERNE



HYDRO FRAME®
HYDRO FRAME® MINI &
HYPERSEAL® WASHERS



EBENFALLS ERHÄLTlich MIT



Bestellen Sie Ihre



Gratismuster zum Testen



Aurum



with **Manuka Honey**

In der Schweiz erhältlich bei:

GRIBI AG BELP

Hühnerhubelstrasse 59, CH-3123 Belp

Tel. +41 31 818 40 80

Fax +41 31 818 40 85

E-Mail: info@gribi.ch

www.gribi.ch