



# ClearView-TRIO

Anti-buée solution

“Warm-Wipe-Swab“

**Chauffe-endoscope**

**Lingette de nettoyage**

**Ecouvillon Trocart**



**Emballage 3-en-1**

- ✓ Stérile
- ✓ Simple
- ✓ Efficace
- ✓ Économique



**GRIBI AG BELP**



**2MEDICAL**  
europe



# ClearView-TRIO

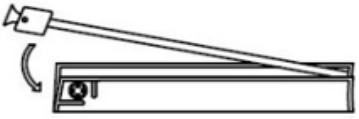
*Anti-buée solution*

## Chauffage Simple

- Pas d'eau chaude
- Pas d'électricité
- Clique & chauffer

## Nettoyage Simple

- ✓ 4 Lignettes & 2 Ecouvillon
- ✓ Tout inclus, sterile

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ClearView™ TRIO</b><br>3in1 Anti-Fog solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2. Lingette pour lentille d'endoscope</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrir 1 sachet unique</li><li>• Sortez la lingette</li><li>• Nettoyer la lentille</li><li>• Jeter l'essuyage</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1. Chauffe-endoscope:</b><br><br>1. PLACER L'ENDOSCOPE DANS LE CHAUFFEUR<br><br><br>2. FLEXION LE DISQUE 2 OU 3 FOIS<br><br><br>3. TEMPÉRATURE D'UTILISATION<br><br><b>Note: Placer le chauffe-endoscope en route 15 minutes avant d'utiliser l'endoscope.</b><br>ClearView™ reste chaud pendant 90 minutes.<br>Couvrir à l'aide d'une serviette stérile afin de le maintenir stérilisé et de conserver la chaleur.<br><br>Conservez les lingettes et les tampons dans le chauffe-endoscope pendant la procédure, pour éviter que la différence de température provoque de la buée sur la lentille lors de l'utilisation. | <b>3. Endoscope nettoyer Ecouvillon:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Choisissez la taille appropriée 5 mm ou 10 mm</li><li>• Utilisez l'écouvillon pour nettoyer l'ouverture du trocart afin d'éviter la buée sur une lentille sale</li><li>• l'écouvillons ne doivent pas être insérés sur un angle ou dépasser l'extrémité distale du trocart.</li><li>• Jeter à la fin de la procédure</li></ul>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SANS LATEX, SANS DEHP, USAGE UNIQUE<br/>PRODUIT STÉRIL SAUF SI EMBALLAGE OUVERT OU ENDOMMAGÉ</p> <p>Date de fabrication : voir scellé<br/>Date d'expiration : 5 ans à partir de la date de fabrication<br/>Ne pas conserver en dessous de -20°C<br/>Ne pas utiliser sur endoscopes ne convenant pas au pré-réchauffement</p> <p>Produit nr. 31TR01</p>                                                                                                                                           |

# GRIBI AG BELP

Gribi AG Belp  
Hühnerhubelstrasse 59  
CH-3123 Belp  
Telefon +41 31 818 40 80  
[info@gribi.ch](mailto:info@gribi.ch)