



ClearView-TRIO

Anti-buée Lösung

“Warm-Wipe-Swab“

Optik-Wärmer

Reinigungs-Tuch

Trocar-Tupfer



3-in-einer Packung

- ✓ Steril
- ✓ Einfach
- ✓ Effizient
- ✓ Wirtschaftlich



GRIBI AG BELP



2MEDICAL
europe



ClearView-TRIO

Anti-Beschlag Lösung

Einfache Erwärmung

- Kein heißes Wasser
- Kein Strom
- Klicken & wärmen

Einfache Reinigung

- ✓ 4 Tücher & 2 Tupfer
- ✓ Alles enthalten
- ✓ Steril

ClearView™ TRIO 3in1 Anti-Fog solution	
Verwendungszweck: Anti-Beschlag; Vorwärmen, Linse & Trokarreinigung in der endoskopischen Chirurgie	
1. SCOPEWARMER: 1. SCOPE(S) IN DEN WÄRMER LEGEN  2. SCHEIBE 2 ODER 3 MAL BIEGEN  3. WARM FÜR DEN GEBRAUCH Achtung: Der Scope Wärmer sollte 15 Minuten vor Gebrauch des Scope angewendet werden. ClearView™ bleibt bis zu 90 Minuten warm. Mit sterilem Handtuch abdecken um die Sterilität zu bewahren und die Wärme zu erhalten. Bewahren Sie Tücher und Tupfer während des Verfahrens im Wärmer, um zu vermeiden, dass die Linse aufgrund Temperaturunterschieden beim Gebrauch beschlägt.	2. Tuch für Endoskope Linse: • Öffnen Sie 1 Beutel • Nehmen Sie das Tuch heraus • Linse reinigen • Abwerfen  3. Endoskopisch Reinigung Tupfer: • Wählen Sie die passende Größe 5 oder 10 mm • Verwenden Sie einen Tupfer, um die Trokar Öffnung zu reinigen, um Sehbehinderung beslag am verschmutzten Gläsern zu vermeiden. • Tupfer sollten nicht im Winkel eingeführt oder über das distale Ende des Trokars vorgeschoben werden. • Am Ende des Verfahrens werfen  LATEXFREI, DEHP-FREI, FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH PRODUKT STERIL BIS AUF VERPACKUNG GEÖFFNET ODER BESCHÄDIGT Herstellungsdatum: Siehe Versiegelung Verfallsdatum: 5 Jahre ab Herstellungsdatum Nicht unter -20°C lagern Nicht geeignet für Optiken, die nicht vorgewärmt werden dürfen Produkt NR. 31TR01

GRIBI AG BELP

Gribi AG Belp
Hühnerhubelstrasse 59
CH-3123 Belp
Telefon +41 31 818 40 80
info@gribi.ch