

**Cathéter pour Hystérosalpingographie****Confort et contrôle dans un cathéter**

Plus souple et flexible, le cathéter est mini invasif, diminue l'inconfort durant l'examen de l'utérus. Cathéter en matière synthétique, garantie sans latex. Le ballonnet ménage les tissus sensibles.

**Pose aisée**

Permet une introduction aisée. Après la pose, aucune manipulation n'est nécessaire. Une pince "ténaculum" n'est que rarement utilisé.

**Simplicité d'application**

Le revêtement synthétique facilite l'introduction et la mise en place du cathéter. Une fois le cathéter en place, le ballonnet peut être facilement gonflé. Le ballonnet réduit la fuite de liquide et permet un diagnostic optimal.

**Améliore les images pour le diagnostic**

GyneCath a été développé pour l'injection transvaginale de solution saline ainsi que les liquides de contraste à base aqueuse pour les examens radiologiques. Dès que le ballon est gonflé, la vision de la cavité utérine et des annexes est nettement améliorée.

**Spécifications du produit**

Densité radiologique de 12 inch, 5 et 7 FR , flexible  
GyneCath a une extrémité fermée, arrondie et deux ouvertures latérales distales.  
Le ballonnet garanti sans latex, est vers l'extrémité proximale et ont une capacité de 3 cc ou 6 cc.  
La tubulure flexible a une double lumière et permet ainsi le gonflement du ballonnet et l'introduction du liquide de contraste ou de la solution saline.

| No. d'article | Description                                  |
|---------------|----------------------------------------------|
| 6CO19610      | GyneCath Catheter 5 FR (10 pièces par boîte) |
| 6CO19611      | GyneCath Catheter 7 FR (10 pièces par boîte) |

**Cathéter pour hystérosalpingographie avec guide (stylet)**

**Pour une meilleure vision de l'utérus**

**Avantages du produit**

- > Produit original Ackrad
- > Introducteur intégré pour faciliter l'introduction du cathéter
- > Facilité d'introduction grâce à son revêtement synthétique
- > Une pince "ténaculum" n'est plus nécessaire
- > Disponible en taille 5 FR
- > Produit idéal pour un usage en consultation
- > Garanti sans latex
- > La vision de la cavité utérine et des annexes est nettement améliorée lors des hystérogaphies et des salpingographies.

Le cathéter de perfusion avec fil introducteur intégré est mini-invasif et facile à utiliser.

Améliore le diagnostic et améliore la sécurité de la patiente.

Le H/S cathéter est utilisé pour l'injection de:

- > Solution saline lors d'hystéro-sonographies
- > Produit de contraste à base de solution aqueuse lors d'hystéro-salpingographies



| No. d'article | Description                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 6CO61-3005    | H/S Cathéter, stylet intégré, 5 FR, (10 pièces/boîte) |