

– **bess | oto** –
Produkte für die Otologie



– bess | oto –

Produkte für die Otologie

Inhalt

bess | oto Paukenröhrchen

bess oto Tannenbaum Ohrstöpsel	3
bess oto Donaldson	4
bess oto Shepard mit Faden.....	4
bess oto Shepard mit oder ohne Faden	4
bess oto Reuter	5
bess oto T-Tube	5

Einführinstrument

bess oto VT-03.....	5
-----------------------	---

Tübinger Paukenröhrchen

Standard Paukenröhrchen	6
Paukenröhrchen mit Ösen.....	6
Paukenröhrchen Diabolo	7
Paukenröhrchen mit Trokar	7
Minimal-Paukenröhrchen (Benz)	7

Paukenröhrchen – Übersicht.....

bess folio Silikonfolien für die Otologie	9
bess folio SilikonStrips.....	9
OTOSILK™.....	9
PVA-Tamponaden.....	10
Instrumentenwischtücher.....	10
Einweg-Sauger für die Otologie.....	10

— bess | oto — Paukenröhrchen



Auf der sicheren Seite

Unsere bess | oto Paukenröhrchen aus Silikon bzw. Fluorplastik sind mit größter Sorgfalt aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfüllen alle Anforderungen hinsichtlich Qualität und Sicherheit.

bess | oto Paukenröhrchen kommen steril in einer 10er-Spenderbox. Jedes Paukenröhrchen liegt in einer transparenten Plastikbox, welche leicht mit einer Hand zu öffnen ist, während mit der anderen Hand das Paukenröhrchen sicher entnommen werden kann. Jede Plastikbox ist steril im Blister eingeschweißt und enthält ein ablösbares Etikett für die Patientenakte.



bess | oto Tannenbaum Ohrstöpsel

Nach Einsatz eines Paukenröhrchens und bei Trommelfeldefekten sollte das Mittelohr vor dem Eindringen von Wasser geschützt werden. Aus diesem Grund sollten Patienten mit Paukenröhrchen beim Kontakt mit oberflächenentspanntem Wasser (z.B. beim Duschen oder Haare waschen) Ohrstöpsel tragen.

bess | oto Tannenbaum Ohrstöpsel minimieren das Risiko des Eindringens von Wasser und sind in drei Größen erhältlich.

Material: Silikon

Reinigung: mit warmem Wasser, auskochbar.



IHR SERVICE FÜR
IHRE PATIENTEN

REF	Größe	VE (Paar)
BM 11 1101	klein	1
BM 11 1102	mittel	
BM 11 1103	groß	

Ohrstöpsel — im Set kostenlos!

Zu Paukenröhrchen erhalten Sie von uns die entsprechende Anzahl Tannenbaum-Ohrstöpsel ohne Aufpreis als Set. Sofern Sie bei der Anforderung von Paukenröhrchen eine bestimmte Größenverteilung wünschen, bitten wir Sie, dies bei jeder Bestellung anzugeben. Ansonsten liefern wir 2 große, 4 mittlere und 4 kleine Ohrstöpsel je 10 Paukenröhrchen.

bess | oto Donaldson

Material: Silikon, blau

ID 1,10 mm
AD 2,30 mm
Länge 2,20 mm

REF	VE (Stk.)
BM 11 1041	10



bess | oto Shepard mit Faden

Material: Silikon, blau

ID 1,10 mm
AD 2,40 mm
Länge ohne Faden 2,30 mm
Länge des Fadens 7,50 mm

REF	VE (Stk.)
BM 11 1016	10



bess | oto Shepard mit oder ohne Faden

Material: Fluorplastik, blau

ID 1,14 mm
AD 2,40 mm
Länge ohne Faden 2,20 mm
Länge des Fadens 2,70 mm

REF		VE (Stk.)
BM 11 1017	ohne Faden	10
BM 11 1018	mit Faden	



bess | oto Reuter

Material: Fluorplastik, blau

Größe 1:

ID 1,14 mm
 AD 2,60 mm
 Länge 1,65 mm

Größe 2:

ID 1,27 mm
 AD 3,00 mm
 Länge 2,10 mm

REF	Größe	VE (Stk.)
BM 11 1031	1	10
BM 11 1033	2	



bess | oto T-Tube

Material: Silikon, blau

ID 1,30 mm
 AD 1,70 mm
 Gesamtbreite beider Flansche 8,00 mm

REF	Länge (mm)	VE (Stk.)
BM 11 1005	12,0	10
BM 11 1006	9,0	
BM 11 1007	7,5	
BM 11 1008	6,0	



Einführinstrument

bess | oto VT-03

Zum einfachen Einführen von T-Tube Paukenröhrchen der Längen 12 mm - 9 mm - 7,5 mm oder 6 mm in das Trommelfell nach Parazentese.

Einfache Reinigung des Instruments vor der Sterilisation: Spülen durch Ansetzen einer Spritze oder eines Spülschlauches mit Luer-Lock-Anschluss.

Material: rostfreier Stahl, sterilisierbar

REF	VE (Stk.)
BM 11 9003	1



Tübinger Paukenröhrchen

Diese seit Jahren bewährten Metall-Paukenröhrchen bestechen nach wie vor durch ihre Vorzüge:

- hervorragende Gewebeverträglichkeit
- erleichteter Sekretabfluss durch glatte Oberfläche
- antibakterielle Wirkung (Goldröhrchen)


Materialien:

- Gold-Platin
- Silber-vergoldet
- Titan (ASTM F67 Medical Grade)

REF	Beschreibung	VE (Stk.)
Material: Gold-Platin		
K 1015001	Größe 1	10
K 1015002	Größe 1, mit Draht	
K 1015003	Größe 2	
K 1015004	Größe 2, mit Draht	
Material: Silber-vergoldet		
K 1015010	Größe 1	10
K 1015011	Größe 1, mit Draht	
K 1015012	Größe 2	
K 1015013	Größe 2, mit Draht	
Material: Titan		
K 1015036	Größe 0	10
K 1015030	Größe 1	
K 1015031	Größe 1, mit Draht	
K 1015032	Größe 2	
K 1015033	Größe 2, mit Draht	



**DIE BEWÄHRTEN
STANDARD
PAUKENRÖHRCHEN**

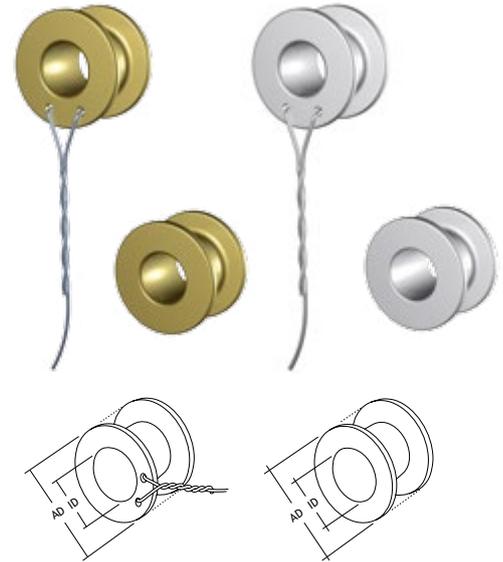

Größe 0

ID: 1,00 mm
AD: 2,00 mm
L: 1,60 mm

Größe 1

ID: 1,25 mm
AD: 2,55 mm
L: 1,60 mm

Größe 2

ID: 1,50 mm
AD: 2,80 mm
L: 1,60 mm

Paukenröhrchen mit Ösen

Mit einer bzw. zwei Ösen für einen sehr langen Verbleib im Trommelfell. Die Spots am vorderen Flansch zeigen die Lage der Ösen hinter dem Trommelfell bei eingesetztem Paukenröhrchen an.


Besonders geeignet bei Belüftungsstörungen im Zusammenhang mit Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten-Missbildungen. Der entscheidende Vorteil gegenüber Langzeit-Röhrchen aus Kunststoff ist die geringere Neigung zum Verstopfen durch ein sehr weites Lumen, sehr glatte Innenflächen und einen kürzeren Sekret-Abflussweg.

Vorteile

- Langzeitverbleib
- guter Sekretabfluss durch glatte Oberfläche
- antibakterielle Wirkung
- hervorragende Gewebeverträglichkeit

Material: Gold-Platin

REF	Beschreibung	VE (Stk.)
K 1015064	mit 1 Öse	10
K 1015065	mit 2 Ösen	

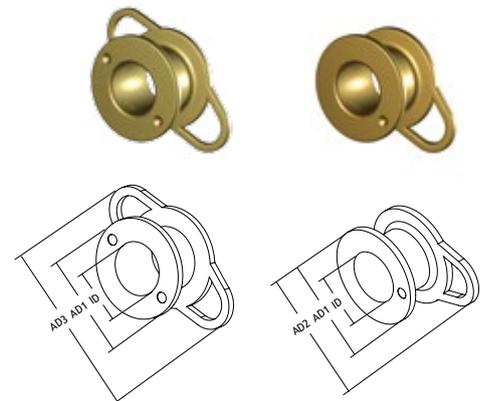

ID: 1,50 mm
AD 1: 2,80 mm
AD 2: 3,80 mm
AD 3: 4,80 mm
L: 1,60 mm

Paukenröhrchen Diabolo


Erleichtert durch den trichterförmigen Außenflansch beim Einsetzen das Anfassen mit dem Mikrozängchen. Der verkürzte Drainageweg wirkt sich günstig auf den Sekretabfluss aus.

Auch in sehr kleinen Dimensionen erhältlich, z.B. für die Behandlung von Säuglingen oder bei sehr engem Gehörgang. Guter Ventilationseffekt dank der geringen Wandstärke.

Vorteile

- sehr guter Sekretabfluss
- antibakterielle Wirkung
- hervorragende Gewebeverträglichkeit

Material: Gold-Platin

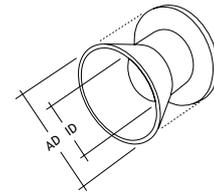

Größe 0

ID: 0,75 mm

AD: 1,60 mm

L: 0,70 mm

Größe 1

ID: 1,25 mm

AD: 2,55 mm

L: 1,50 mm

Größe 2

ID: 1,50 mm

AD: 2,80 mm

L: 1,50 mm

REF	Beschreibung	VE (Stk.)
K 1015051	Größe 0	10
K 1015053	Größe 1	
K 1015055	Größe 2	

Paukenröhrchen mit Trokar


Einfaches Platzieren ohne vorherige Parazentese durch einfaches Durchstechen des Trommelfells. Durch einfache und schnelle Handhabung ist Einsetzen unter Lokalanästhesie möglich. Zur längeren Belüftung und Drainage der Pauke.

Vorteile

- längere Belüftung und Drainage ohne vorherige Parazentese
- einfache und schnelle Handhabung
- gute Gewebeverträglichkeit
- antibakterielle Wirkung (Goldröhrchen)

Materialien:

- Silber-vergoldet
- Titan (ASTM F67 Medical Grade)

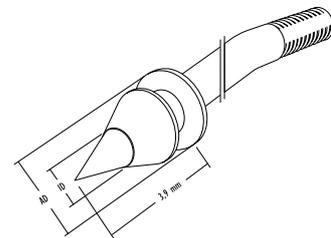

ID: 1,25 mm

AD: 2,80 mm

L: 1,50 mm

REF	Beschreibung	VE (Stk.)
Material: Silber-vergoldet		
K 1015074	Trokar-Röhrchen	10
Material: Titan		
K 1015075	Trokar-Röhrchen	10
notwendiges Zubehör:		
K 8000143	Trokarhalter, Edelstahl (Handgriff, resterilisierbar)	1


Minimal-Paukenröhrchen (Benz)

Schneller und unkomplizierter Einsatz ohne vorherige Parazentese. Einfache und schnelle Handhabung, Einsetzen unter Lokalanästhesie möglich. Zur temporären Paukenbelüftung bei Erwachsenen und zur Verwendung auch bei Druckausgleichsproblemen im Zusammenhang mit hyperbarer Sauerstofftherapie.

Vorteile

- temporäre Belüftung und Drainage ohne vorherige Parazentese
- einfache und schnelle Handhabung
- antibakterielle Wirkung

Material: Edelstahl-vergoldet (nicht MR-safe)

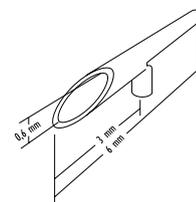

ID: 0,60 mm

AD: 0,90 mm

L: 6,00 mm

REF	VE (Stk.)
K 1015072	10

Paukenröhrchen – Übersicht

REF	Typ	Farbe	Material	Länge (mm)	ID (mm)	AD (mm)			Besonderheiten	
BM 11 1005	bess oto T-Tube*	blau	Silikon	12,00	1,30	1,70			Gesamtbreite beider Flansche: 8,0 mm	
BM 11 1006				9,00						
BM 11 1007				7,50						
BM 11 1008				6,00						
BM 11 1041	bess oto Donaldson				2,20	1,10	2,30			---
BM 11 1016	bess oto Shepard				2,30	1,10	2,40			mit Faden
BM 11 1017	bess oto Shepard			Fluorplastik	2,20	1,14	2,40			---
BM 11 1018	bess oto Shepard				2,20	1,14	2,40			mit Faden
BM 11 1031	bess oto Reuter, Größe 1	blau			1,65	1,14	2,60			---
BM 11 1033	bess oto Reuter, Größe 2				2,10	1,27	3,00			---
K 1015001	Tübingen, Größe 1	Gold-Platin		1,60	1,25	2,55			---	
K 1015002	Tübingen, Größe 1								mit Draht	
K 1015003	Tübingen, Größe 2								---	
K 1015004	Tübingen, Größe 2								mit Draht	
K 1015010	Tübingen, Größe 1	Silber, vergoldet			1,60	1,25	2,55			---
K 1015011	Tübingen, Größe 1									mit Draht
K 1015012	Tübingen, Größe 2									---
K 1015013	Tübingen, Größe 2									mit Draht
K 1015036	Tübingen, Größe 0	Titan		1,60		1,00	2,00			---
K 1015030	Tübingen, Größe 1									---
K 1015031	Tübingen, Größe 1									mit Draht
K 1015032	Tübingen, Größe 2									---
K 1015033	Tübingen, Größe 2				mit Draht					
K 1015064	mit 1 Öse	Gold-Platin			1,60	1,50	AD1 2,80	AD2 3,80	AD3 4,80	mit 1 Öse
K 1015065	mit 2 Ösen									mit 2 Ösen
K 1015051	Diabolo, Größe 0									---
K 1015053	Diabolo, Größe 1			---						
K 1015055	Diabolo, Größe 2			---						
K 1015074	Trokar-Röhrchen	Silber, vergoldet		2,50	1,25	2,80			---	
K 1015075	Trokar-Röhrchen		Titan	2,50	1,25	2,80			---	
K 1015072	Minimal-Paukenröhrchen		Edelstahl, vergoldet	6,00	0,60	0,90			---	

* passendes Einführinstrument: bess|oto VT-03

bess | folio Silikonfolien für die Otologie

Material: Silikon

Größe ca. 150 × 200 mm

- steril
- transparent - gute Durchsicht
- weiß/blau - einfaches Wiederauffinden

REF	Beschreibung	VE
Silikonfolie, steril, zur Implantation geeignet („Unrestricted“)		
BM 20 3010	0,12 mm transparent	5
BM 20 3011	0,12 mm weiß-transparent (weiß eingefärbt)	
Silikonfolie, steril, zur Implantation bis zu 29 Tagen geeignet („Restricted“)		
BM 20 2010	0,12 mm transparent	5
BM 20 2011	0,12 mm weiß-transparent (weiß eingefärbt)	
BM 20 2012	0,12 mm blau-transparent (blau eingefärbt)	



Weitere Silikonfolien sind erhältlich
(verschiedene Größen und Typen).

Bitte fordern Sie Produktinformationen an!

bess | folio SilikonStrips


Material: Silikon

Zur Verwendung im Gehörgang

0,12 × 45 × 6 mm - eine Seite gerundet

- steril
- 3 Strips pro Packung

REF	Beschreibung	VE (Packungen)
Steril, zur Implantation bis zu 29 Tagen geeignet („Restricted“)		
BM 20 1000	transparent	10
BM 20 1001	weiß-transparent (weiß eingefärbt)	
BM 20 1002	blau-transparent (blau eingefärbt)	
BM 20 1003	transparent mit blauen Streifen	

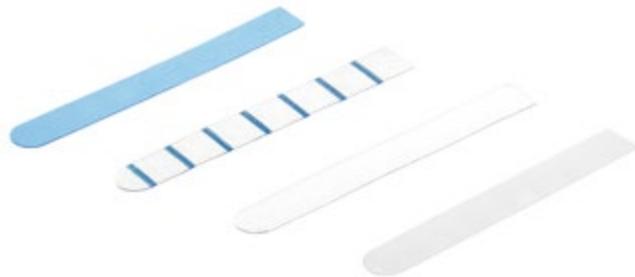


OTOSILK™

Material: Nylon

Zur Verwendung im Gehörgang

- steril
- blau
- Strips: 10 Stück pro Packung
- Graft: 1 Stück pro Packung

REF	Beschreibung/Größe (mm) (Länge × Breite)	VE (Packungen)
BMP OT 16610	Strips/ 45 × 4,00	20
BMP OT 17510	Strips/ 45 × 6,50	20
BMP OT 4601	Graft/ 100 × 150	10

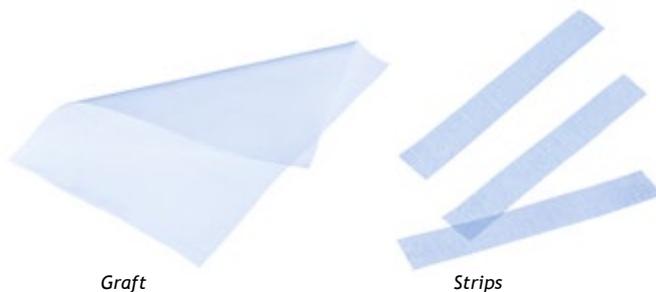

PVA-Tamponaden

PVA-Tamponaden sind vollständig faser- und abriebfrei. Sie zeichnen sich aus durch eine gute Biokompatibilität sowie ausgezeichnete Flüssigkeitsaufnahme und -weiterleitung bei minimierter Wundadhäsion. Durch die komprimierte Form sind sie einfach einzuführen. Sie passen sich sanft und optimal an die anatomischen Gegebenheiten an und können bei Bedarf einfach mit einer Schere zurecht geschnitten werden.

REF	Ø (mm)	Länge (mm)	VE (Stk.)
Q 605201	9	15	50
Q 605205 (offen)	9	15	
Q 605202	9	24	
Q 605206 (offen)	9	24	
Q 605203 (mit Faden)	15	24	10



Weitere PVA-Produkte sind erhältlich.
Bitte fordern Sie Produktinformationen an!

Instrumentenwischtücher

Zur intraoperativen Reinigung mikrochirurgischer Instrumente. Vollständig faser- und abriebfrei für größtmögliche Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen am Ohr, insbesondere bei der Tympanoplastik und Stapesplastik.

REF	Größe (cm)	VE (Stk.)
Q 604201	8,25 × 8,25 × 0,10	20
Q 604202	8,25 × 8,25 × 0,20	



Einweg-Sauger für die Otologie

- zur Verwendung bei Untersuchungen und in der Mikrochirurgie bzw. zur Applikation von Salben oder Medikamenten
- Luer bzw. Luer-Lock-Konnektor
- atraumatisch gerundet
- einzeln steril verpackt
- Material: Edelstahl / Polypropylen



Weitere Einweg-Sauger sind erhältlich.
Bitte fordern Sie Produktinformationen an!

Weitere Spezial-Produkte für die Otologie sind erhältlich.
Bitte fordern Sie Informationen an über



Mittelohrimplantate
und Zubehör



Einwegsauger
und Zubehör



Multifunktionaler
Ballonkatheter
für die HNO



Zertifiziert nach EN ISO 13485



Bitte beachten Sie die den Produkten jeweils beiliegenden
Anwendungshinweise; ausschließlich diese sind maßgeblich. Der
Abdruck von Hinweisen zur Anwendung der Produkte in diesem
Katalog dient lediglich der Verständlichkeit und gibt den Stand der Druck-
legung wieder. Fordern Sie im Bedarfsfall eine aktuelle Version an!

bess ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Die Produkte in diesem Katalog sind C -gekennzeichnet.

bess medizintechnik gmbh
Deutschland: Gustav-Krone-Straße 7 • D-14167 Berlin
Tel.: 030 / 816 909-0 • Fax: 030 / 816 909-16
Österreich: Kaiser-Josef-Platz 41 • A-4601 Wels
Tel.: 07248 / 66 1 44 • Fax: 07248 / 62205
www.bess.eu • office@bess.eu

